

- 1) Измерете необходимата дължина на лентата с помощта на дентален восък, конец или др.



- 2) Полирайте повърхността с несъдържаща флуор паста.



- 3) Изолирайте работното поле с кофердам.



- 4) Изолирайте интерпроксималните пространства с клинчета.



- 5) Обработете леко зъбната повърхност с диамантен борер.
За краткотрайни шини (напр. при травми) тази стъпка не е необходима.



- 6) Поставете ецващ гел върху зъбната повърхност и интерпроксималните пространства на зоната за шиниране, като следвайте инструкциите на производителя.



- 7) Изплакнете и подсушете.




8) Поставете тънък слой адхезив върху ецваната повърхност.



15) Фотополимеризирайте композита, съгласно инструкциите на производителя.



9) Фотополимеризирайте съгласно инструкциите на производителя.

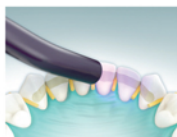

16) Отстранете излишъка от композит.



10) Извадете лентата от блистера и срежете желаната дължина с обикновена ножица. Не пипайте лентата с ръце и не използвайте ръкавици с талк. Върнете неизползваната лента в блистера и го поставете в светозащитната кутия. Съхранявайте на тъмно, за предпочитане в хладилник. Можете да съхранявате до 4 седмици без промяна в качествата на лентата.



17) Полирайте повърхостта на шината.



11) Поставете тънък слой C&B композит (приблизително 0,5 mm). Не фотополимеризирайте! При краткотрайно шиниране (напр. при травми) може да се използва течен композит.




18) Завършена шина.



12) Свалете предпазното фолио на лентата. Поставете лентата върху композита и я адаптирайте към зъбната повърхност. Може да използвате Dentapreg Fork за лесна адаптация.



13) Фотополимеризирайте лентата в продължение на 40 секунди на зъб. Може да използвате Dentapreg Shield за протекция на останалата част от лентата.

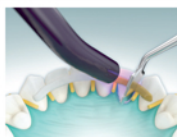

14) Покрийте цялостно лентата със слой течен или C&B композит. Ако шинираните зъби нямат контакт помежду си, изградете такъв с C&B композит.



Важни забележки:

- Шината не трябва да пречи на оклузалния контакт. Фиксирането на лентата на отделни места с течен композит не осигурява достатъчна връзка със зъбната повърхност. Фиксирайте лентата по цялата ѝ дължина. Горепосланата процедура се отнася за повърхностно фиксирани шини. За по-добро шиниране на пародонтологично компрометирани зъби, може да се направи интракоронарна шина. Процедурата е същата, като при повърхностните, с изключение на стъпката по подготовка на повърхността за шиниране. Ширината на улея трябва да бъде достатъчна за поставяне на лентата, имайте предвид ширината на Dentapreg SFM – 2 mm.